

Before use, consult HaloFogger® Operation Manual for warning information, complete operating and treatment protocol instructions.


Antes del uso, consulte el Manual de Usuario de HaloFogger para obtener advertencias, instrucciones de funcionamiento completos, y protocolos de tratamiento.

Quick Instructions | Instrucciones Rápidas


- 1 Pre-Clean Room**
Limpia la habitación



- 2 Prepare Room**
Prepare la habitación

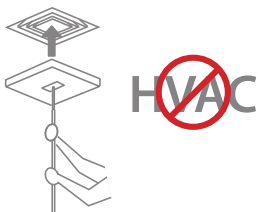


- 3 Calculate Room Size**
Calcular Tamaño de la Habitación

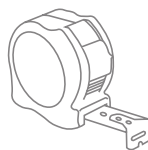


$$L \times W \times H = \text{ft}^3/\text{m}^3$$

- 4 Determine Fog Time**
Determinar el Tiempo de Nebulización

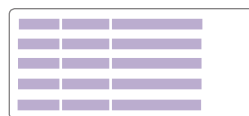


- 5 Plug in HaloFogger**
Conectar el nebulizador

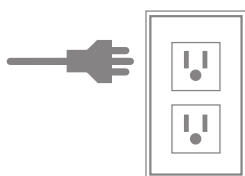


- 6 Set Timer**
Establecer el Tiempo




- 7 Check/Fill Disinfectant**
Chequear/Llenar Desinfectante

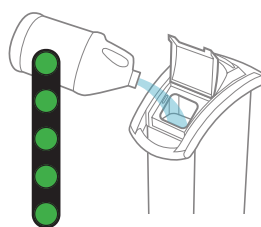

- 8 Press and Hold Start Button**
Mantener Pulsado el Botón 'Start'

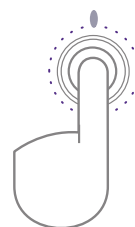

- 9 Leave Room and Seal Doors**
Dejar el Espacio y sellar puertas

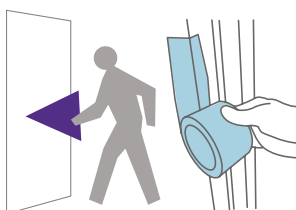

- 10 Post Sign**
Poner una señal



- 11 Wait Time / Room Re-Entry**
Tiempo de espera / reingreso de habitación



HVAC ON



Fog Times based on room size Fog Times basado en el tamaño de la habitación

ft ³	m ³	Timer Setting Ajuste del temporizador
50 - 75	1 - 2	1 minutes
80 - 150	3 - 4	2
155 - 225	4 - 6	3
230 - 300	7 - 8	4
305 - 375	9 - 11	5
380 - 450	11 - 13	6
455 - 525	13 - 15	7
530 - 750	15 - 21	10
755 - 1125	21 - 32	15
1130 - 1500	32 - 42	20
1505 - 1875	43 - 53	25
1880 - 2250	53 - 64	30

Room Re-Entry

Consult HaloMist Disinfectant Use Instructions for room re-entry procedure.

Reingreso a la Habitación

Consulte el Manual del Protocolo de desinfección de Halo apropiado para procedimiento en la sala de reingreso.