


Quick Instructions | Instrucciones Rápidas

Consult HaloFogger® User Manual for warning information and operating instructions.

Consulte HaloFogger® Manual del usuario para advertir de información e instrucciones de manejo.

1 Calculate Room Size

Calcular Tamaño de la Habitación

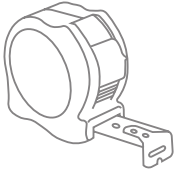

$$L \times W \times H = \text{ft}^3/\text{m}^3$$


2 Determine Fog Time

Determinar el Tiempo de Nebulización




3 Set Timer

Establecer el Tiempo

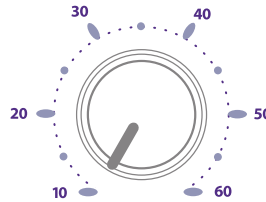


4 Plug in HaloFogger

Conectar el nebulizador

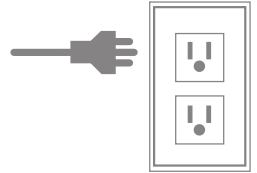

5 Check/Fill Disinfectant

Chequear/Llenar Desinfectante

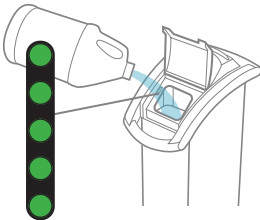


6 Press and Hold Start Button

Mantener Pulsado el Botón Start



7 Leave Room

Dejar el Espacio

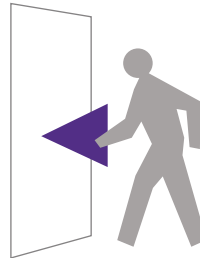

8 Post Sign

Poner un Letrero



Fog Times for dispensing Halo™ Disinfectants

Tiempos de Nebulizar para dispensar Halo™ Disinfectants

For detailed instructions and caution information, consult appropriate Protocol Manual for disinfectant being used.

Para obtener instrucciones detalladas e información de precaución, consulte el Manual de Protocolo adecuado para el desinfectante que se utiliza.

ft ³	m ³	Fog Time Tiempo de nebulización
400 - 1,800	11 - 50	10 minutes
1,800 - 2,600	50 - 75	15
2,600 - 3,500	75 - 100	20
3,500 - 4,400	100 - 125	25
4,400 - 5,200	125 - 150	30
5,200 - 6,100	150 - 175	35
6,100 - 7,000	175 - 200	40
7,000 - 7,900	200 - 225	45
7,900 - 8,800	225 - 250	50
8,000 - 9,600	250 - 275	55
9,600 - 10,500	275 - 300	60

Room Re-Entry

Consult appropriate Halo Disinfectant Protocol Manual for room re-entry procedure.

Reingreso a la Habitación

Consulte el Manual del Protocolo de desinfección de Halo apropiado para procedimiento en la sala de reingreso.